

ichroma™ AFP

Configuración de Prueba

Procedimiento de Prueba

Componentes

Chip ID

Buffer de detección

Cartucho de Prueba

iCHROMA II

1

Encienda el interruptor

2

Inserte el chip ID

3

Presione el botón "Multi Test"

Usando sangre entera

1

Extraiga la sangre

2

Añádala al buffer de detección

Usando Suero/Plasma/Control

1

Extraiga Serum, Plasma, Control

2

Añadir al buffer de detección

3

Agite el buffer de detección

4

Extraiga del buffer de detección

5

Cargue la mezcla de muestra

6

Espera 15 minutos

7

Inserte el cartucho en el lector de iChroma

8

Presione "Select"

9

Lea el resultado