

## Componentes



Cartucho Prueba



Tubo de mezcla



DiluDi eCnhteip d etector

ID Chip

Asegúrese de que el número de lote coincida.

**LOT** Coincide **LOT**

Si el buffer de extracción es guardado en refrigeración, mantenga el tubo de recolección de muestra a temperatura ambiente 30 minutos antes de hacer la prueba.

## Procedimiento

- 1 Transfiera 150  $\mu$ L (suero/plasma/control humano) al tubo de detección.



- 2 Cierre la tapa del tubo detector y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces.




- 3 Tome 75  $\mu$ L de la mezcla de muestra y dispénsela en el pocillo de muestra del cartucho.




- 4 Deje el cartucho a temperatura ambiente durante 12 minutos.



- 5 insértelo en el soporte del cartucho del equipo

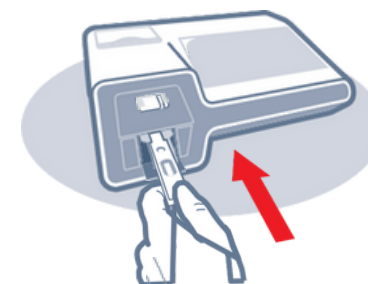

- 6 Presione 'Iniciar'

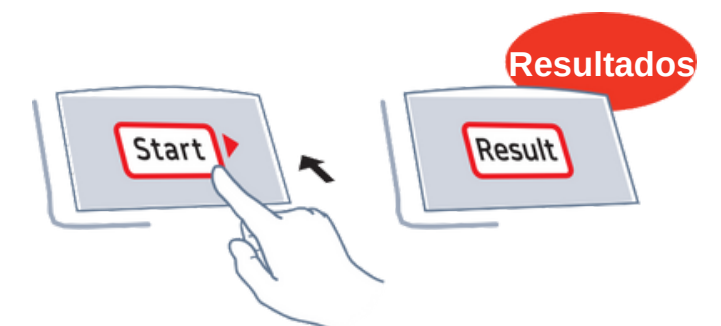

- 7 Lea los resultados