


## Componentes

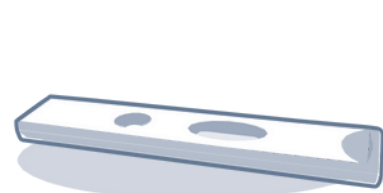

Cartucho Prueba



Tubo de mezcla



Diluyente detector



ID Chip

⚠ Asegúrese de que el número de lote coincida.

**LOT** Coincide **LOT**

Si el buffer de extracción es guardado en refrigeración, mantenga el tubo de recolección de muestra a temperatura ambiente 30 minutos antes de hacer la prueba.

## Procedimiento

- 1** Tomar 500 µL de diluyente



- 2** Añádalo al tubo de mezcla



- 3** añadir 10 µL de muestra (suero/plasma/control)



- 4** Cierre la tapa del tubo detector y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces.




- 5** Tome 75 µL de la mezcla de muestra y dispénsela en el pocillo de muestra del cartucho.




- 6** Deje el cartucho a temperatura ambiente durante 10 minutos.



- 7** insértelo en el soporte del cartucho del equipo

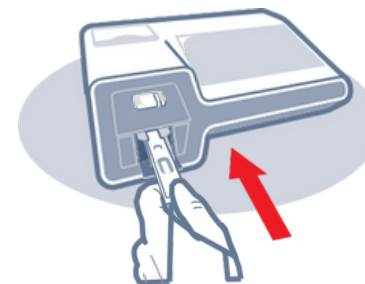

- 8** Presione 'Iniciar'

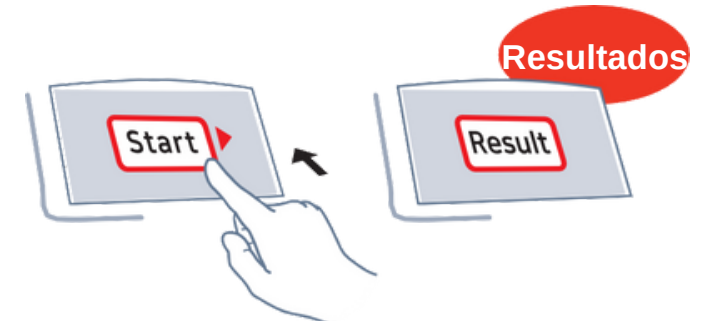

- 9** Lea los resultados