


Componentes

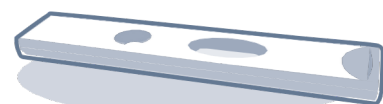

Cartucho Prueba



Tubo de mezcla



ID Chip




Asegúrese de que el número de lote coincida.

LOT Coincide **LOT**



Si el buffer de extracción es guardado en refrigeración, mantenga el tubo de recolección de muestra a temperatura ambiente 30 minutos antes de hacer la prueba.

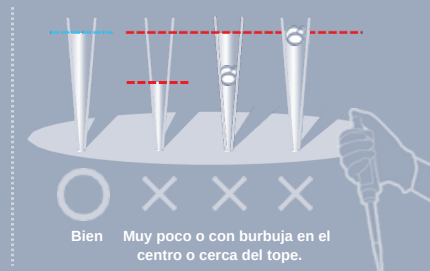

Procedimiento


- 1** Transfiera 75 μ L (suero/plasma/control humano) al tubo de detección.



- 2** Cierre la tapa del tubo detector y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces.




- 3** Tome 75 μ L de la mezcla de muestra y dispénsela en el pocillo de muestra del cartucho.

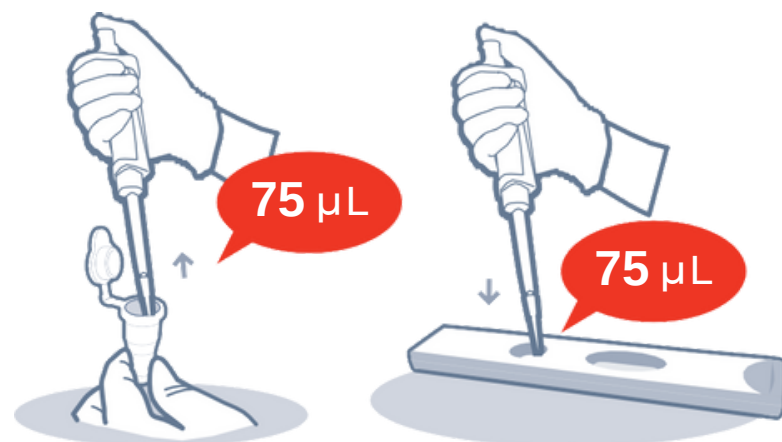


- 4** Deje el cartucho a temperatura ambiente durante 12 minutos.



- 5** insértelo en el soporte del cartucho del equipo

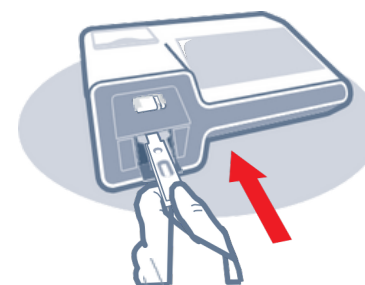

- 6** Presione 'Iniciar'

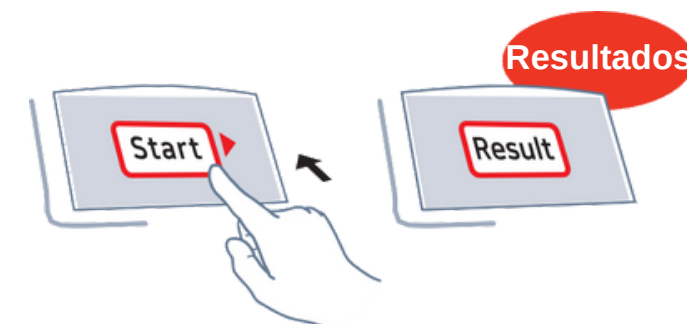

- 7** Lea los resultados