

Componentes



Cartucho Prueba



Buffer detector



Chip de identificación




Asegúrese de que los números de lote de todos los componentes coincidan.

LOT Matches LOT




Permita que los componentes refrigerados estén la temperatura ambiente al menos 30 min antes de la prueba.

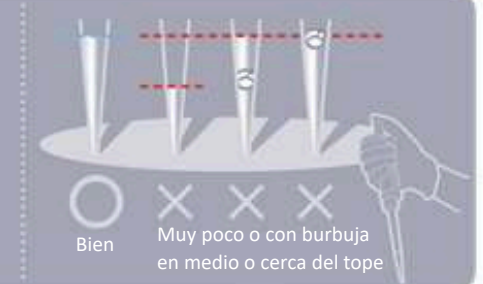


Procedimiento

1

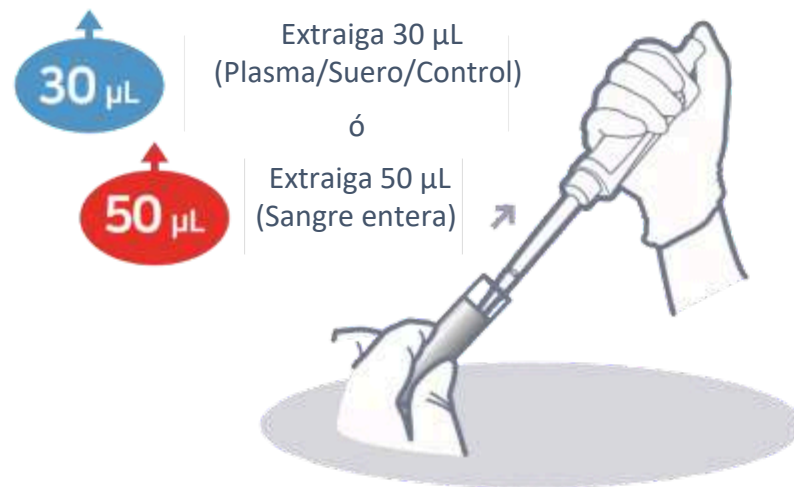

2

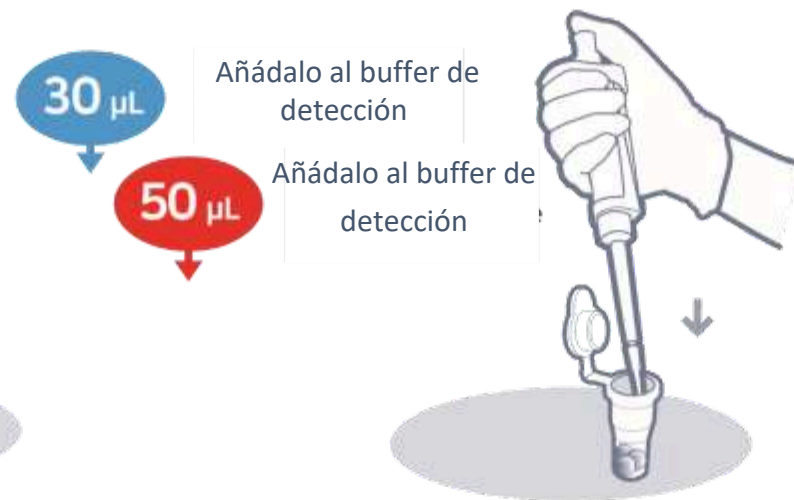

3

Agite 10 veces



4

Extraiga 75 µL



5

Cargue la mezcla de muestra




6

Espere 10 min




7

Inserte el cartucho prueba

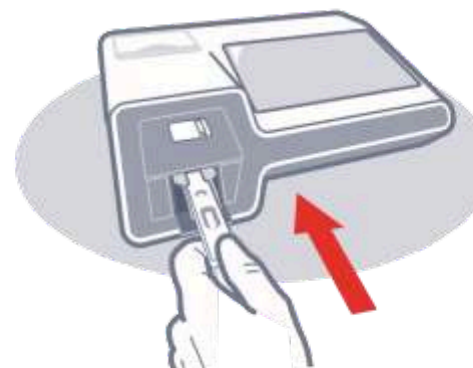

8

Presione "Start"

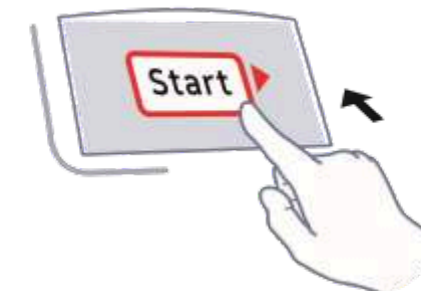

9

Lea los resultados

