

ID Chip

Sample Collector

Detection Buffer Tube

Test Cartridge

ichromaTM

Important

Asegúrese de que los números de lote de todos los componentes coincidan.

LOT Matches LOT

Permita que los componentes refrigerados estén a temperatura ambiente al menos 30 min antes de la prueba.

1 encienda el equipo

2 inserte el ID Chip

3 seleccione el modo a usar del equipo

4 ropa la parte superior del tampón de detección

1 llenar el colector con la muestra

2 inserte el colector con la muestra en la tubo detector

3 mezclar unas 10 veces

10 times

4 descartar dos gotas

5 Aplique dos gotas de la mezcla en el cartucho.

2 drops

6 insértelo en el porta cartuchos del instrumento

7

3 mins

3 min a t° ambiente

8 iniciar y leer resultado

Result

Rev 00.130530 CRP