

Configuración de Prueba

Procedimiento de Prueba

Componentes

Chip ID

Buffer de detección

Cartucho de Prueba

iCHROMA II Reader

1 Encienda el interruptor

2 Inserte el chip ID

3 elija el modo

Usando sangre entera

1 Tome 10µL de muestra (sangre/plasma/control)

2 Añadir al buffer de detección

3 Agite el buffer de detección

4 Extraiga del buffer de detección

5 Cargue la mezcla de muestra

6 deje 12 minutos a temperatura ambiente

7 Inserte el cartucho en el lector de iChroma

8 Presione "iniciar"

9 Lea el resultado