


Componentes

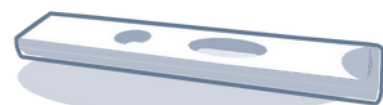

Cartucho Prueba



Tubo de mezcla



Diluyente detector



ID Chip




Asegúrese de que el número de lote coincida.

LOT Coincide **LOT**



Si el buffer de extracción es guardado en refrigeración, mantenga el tubo de recolección de muestra a temperatura ambiente 30 minutos antes de hacer la prueba.

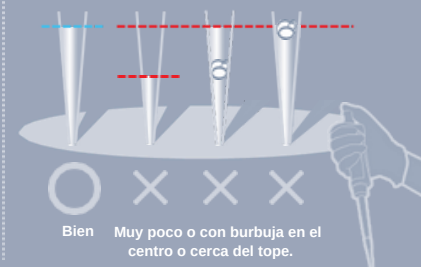

Procedimiento

- 1** Tomar 150 µL de diluyente



- 2** Añádalo al tubo de mezcla




- 3** añadir 30 µL de muestra (suero/plasma/control)




- 4** Cierre la tapa del tubo detector y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces.




- 5** Tome 75 µL de la mezcla de muestra y dispénsela en el pocillo de muestra del cartucho.

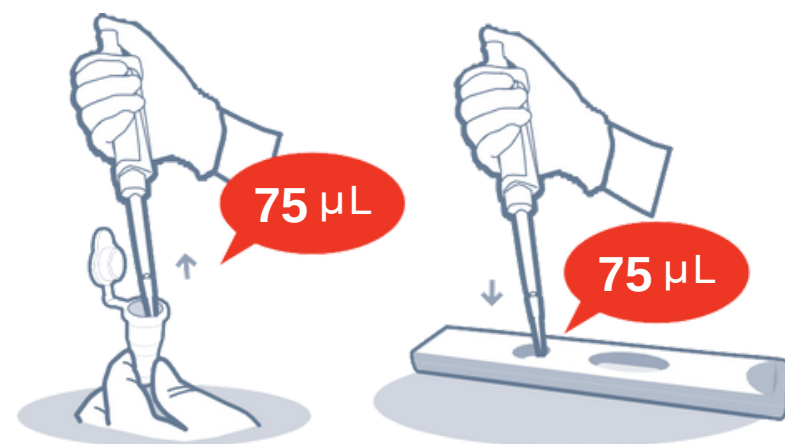


- 6** Inserte el cartucho cargado en la ranura del i-Chamber 10 min a 25°C

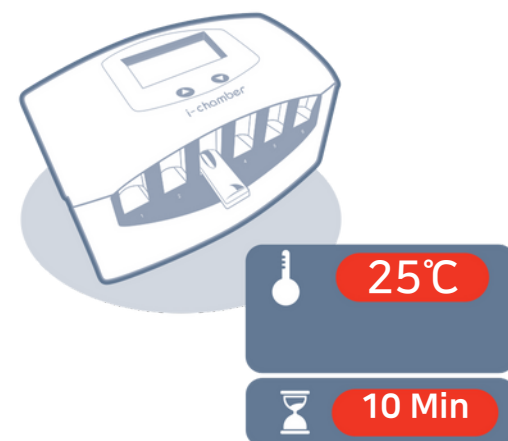

- 7** insértelo en el soporte del cartucho del equipo

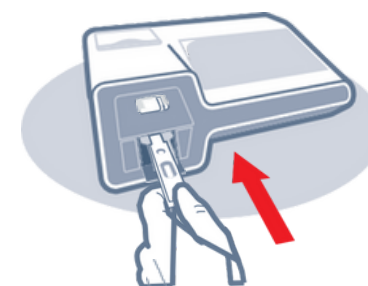

- 8** Presione 'Iniciar'

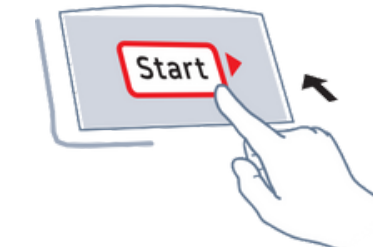

- 9** Lea los resultados

