

Componentes



Procedimiento

- 1 Tomar 150 μ L de diluyente
- 2 Añádalo al tubo de mezcla
- 3 Tomar 50 μ L de muestra (sangre entera) o 30 μ L (suero/plasma/control)
- 4 Cierre la tapa del tubo detector y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces.



- 5 Tome 75 μ L de la mezcla de muestra y dispénsela en el pocillo de muestra del cartucho.
- 6 Deje el cartucho a temperatura ambiente durante 15 minutos.
- 7 insértelo en el soporte del cartucho del equipo
- 8 Presione 'Iniciar'
- 9 Lea los resultados

