

Configuración

Componentes

Chip de identificación

Buffer de detección

Cartucho Prueba

iCHROMA II Equipo

1

Coloque el switch en "ON"

2

Inserte el chip de identificación

3

Presione "Multi test"

Procedimiento

En caso de Suero/Plasma/Control

1

Extraiga el suero, plasma o control

2

Añádalo al buffer de detección

3

Agite el buffer de detección

4

Extraer del buffer de detección

5

Cargue la mezcla de muestra

6

Esperar 15 minutos a temperatura ambiente

7

Inserte el cartucho en el lector del iChroma

8

seleccione la opción de iniciar para leer la prueba

9

Lea los resultados