
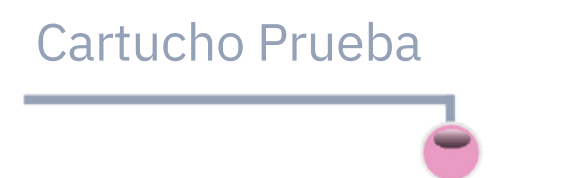
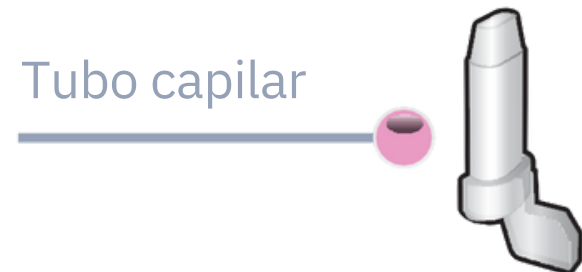


ichromaTM PSA TOTAL

Configuración


Componentes

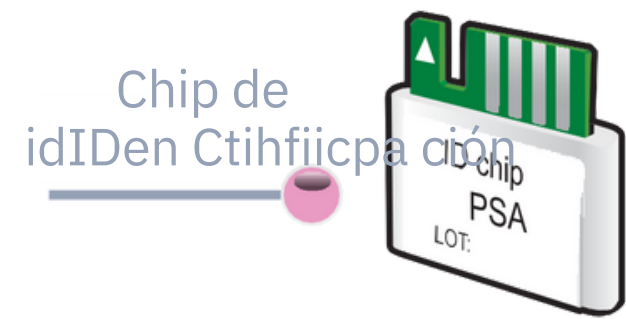

iCHROMA II Equipo




1 Coloque el switch en "ON"

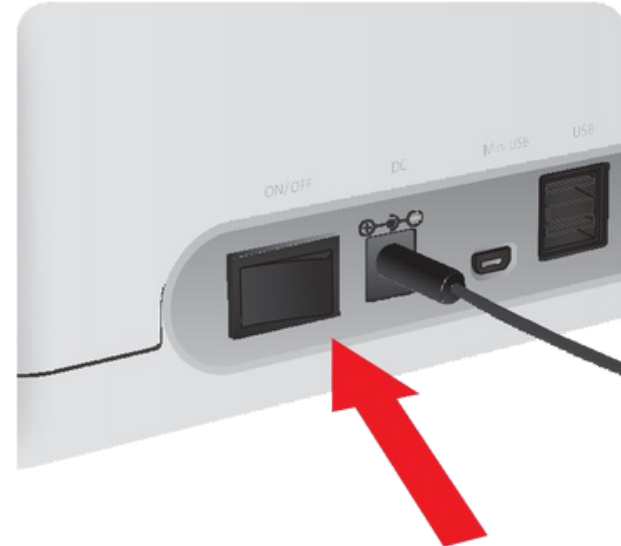

2 Inserte el chip de identificación



3 Presione "Multi test"

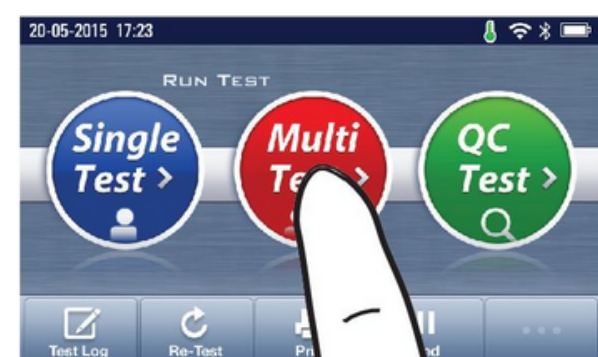

Procedimiento

En caso de Suero/Plasma/Control

1 Extraiga el suero, plasma o control






2 Añádalo al buffer de detección




En caso de sangre


1 Extraer la sangre

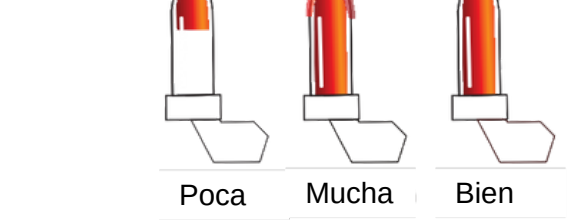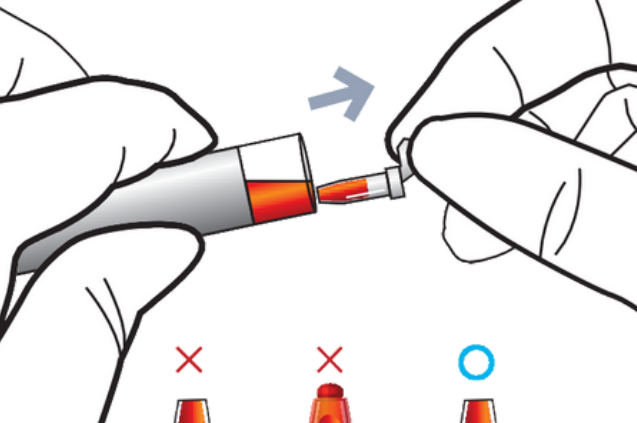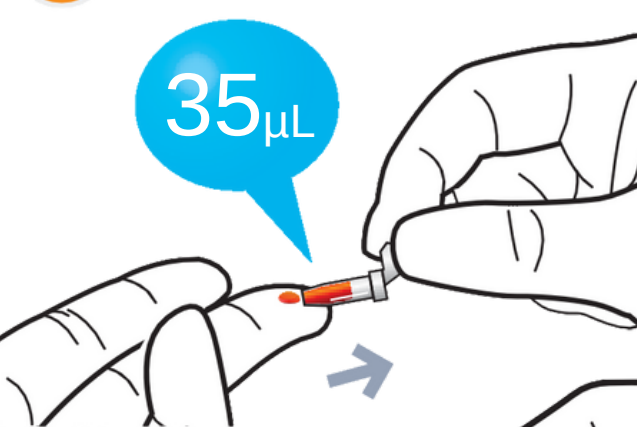



2 Vacíe en el buffer de detección

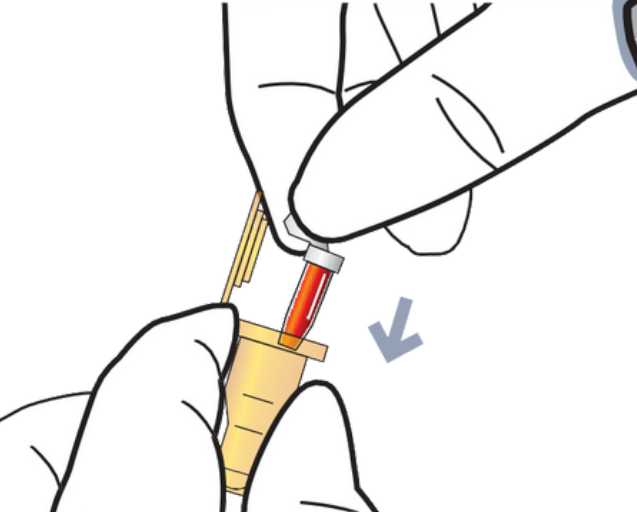

3 Agite el buffer de detección

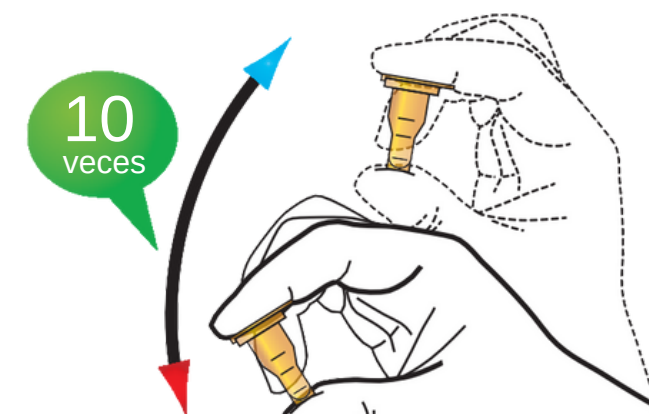

4 Extraer del buffer de detección

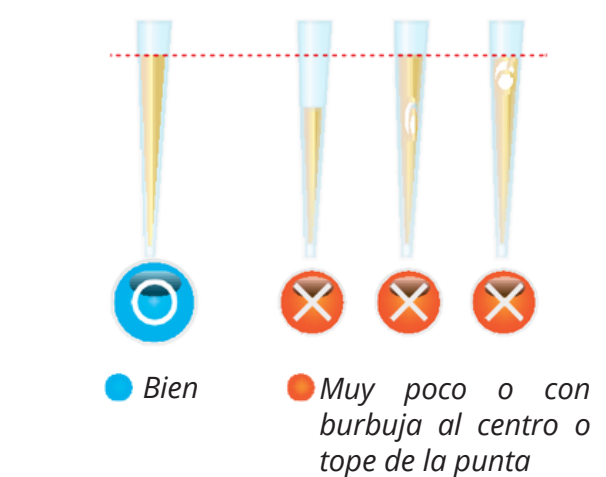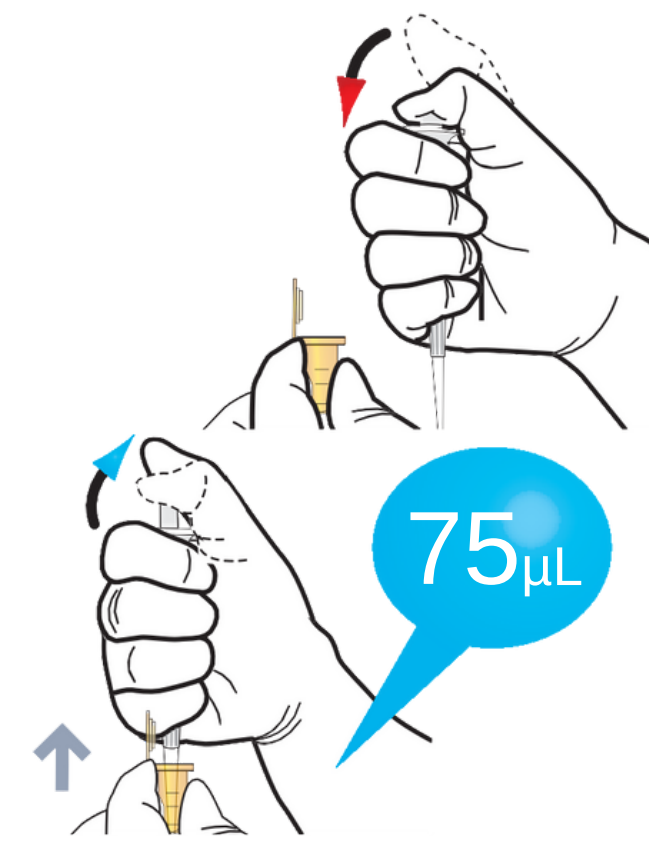


5 Cargue la mezcla de muestra




6 Espere 15 minutos



7 Inserte el cartucho en el lector del iChroma

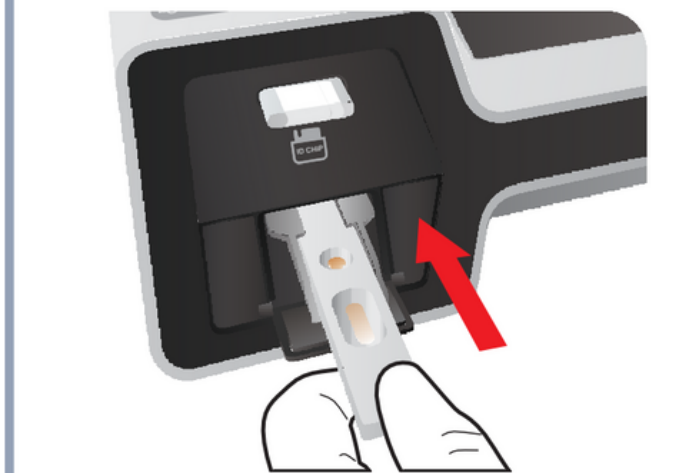

8 seleccione la opción de iniciar para leer la prueba

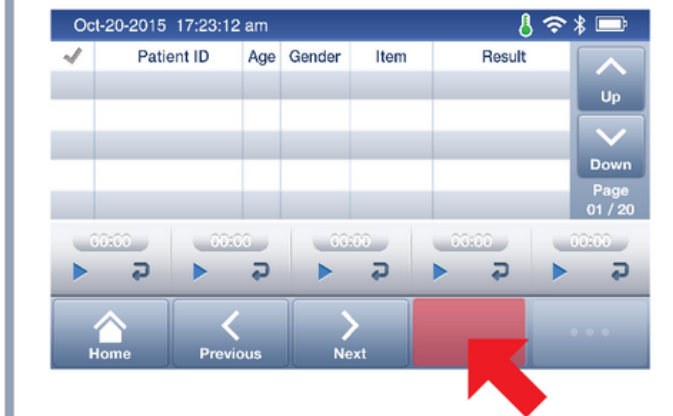

9 Lea los resultados





ichroma™



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

- 1) Transfiera 75 µL de muestra humana (suero / plasma / control) utilizando una pipeta de transferencia a un tubo que contiene el buffer de detección.
Si la prueba se realiza en sangre completa, transfiera la sangre de la yema del dedo (recogida en un tubo capilar) al tubo de detección de tampón.
- 2) Cierre la tapa del tubo de buffer de detección y mezcle bien la muestra agitándola unas 10 veces. (La mezcla de muestra debe usarse de inmediato).
- 3) Pipetee 75 µL de una mezcla de muestra y dispense en el pozo de muestra en el cartucho.
- 4) Deje el cartucho cargado con la muestra a temperatura ambiente durante 15 minutos.
⚠ Escanee el cartucho cargado con la muestra inmediatamente cuando termine el tiempo de incubación. Si no, causará resultados de prueba inexactos.
- 5) Para escanear el cartucho cargado con la muestra, insértelo en el soporte del cartucho del instrumento ichroma™. Asegure la orientación adecuada del cartucho antes de empujarlo completamente dentro del soporte del cartucho. Se ha marcado una flecha en el cartucho especialmente para este propósito.
- 6) Presione el botón 'Seleccionar' en el instrumento ichroma™ para comenzar el proceso de escaneo.
- 7) El instrumento ichroma™ comenzará a escanear el cartucho cargado con la muestra inmediatamente.
- 8) Lea el resultado de la prueba en la pantalla de visualización del instrumento ichroma™.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA

El instrumento ichroma™ calcula el resultado de la prueba automáticamente y muestra la concentración de PSA de la muestra de prueba en términos de ng / ml. El punto de corte (valor de referencia): 4,00 ng / ml. Si el resultado de la prueba es superior a 4,00 ng / ml, comuníquese con su médico de inmediato para una investigación más detallada. El resultado de la prueba por debajo de 4.00 ng / mL no excluye completamente la posibilidad de un trastorno de próstata. Rango de trabajo : 0.1-100 ng / mL (para suero / plasma)
0.5-100 ng / mL (para sangre entera)