

ichromax™

T4 total

Componentes Prueba

Estas no son las instrucciones completas. Para mayor información consulte el inserto.

Preparación



Cartucho de Prueba



Tubo Detector



Diluyente Detector



Chip de Identificación



i-Chamber



25°C


Antes de la prueba, fije la temperature en 25°C

Procedimiento


1 Extraer 200µL
(Diluyente detector)




2 Añadir al Tubo
De Detección

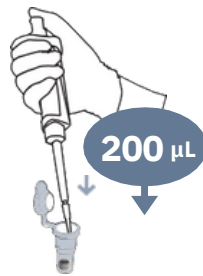


3 Extraer 75 µL
(Suero / Plasma / Control)

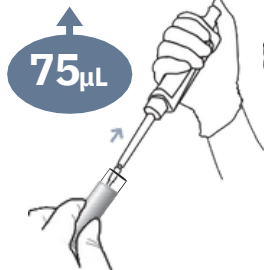

4 Añadir Tubo
De Detección

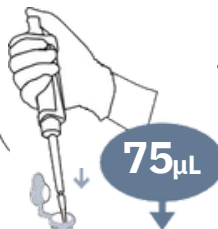

5 Pipetear la mezcla
10 veces.

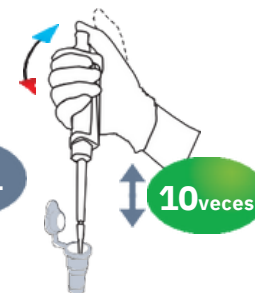


6 Agite 10 veces



7 Espere 8 minutos



8 Extraer 75 µL

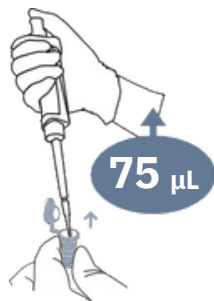


9 Cargue la mezcla de
muestra




10 Espere 8 min



11 Inserte el cartucho de
prueba

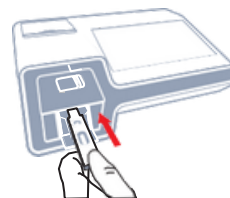

12 Presione
"Start"

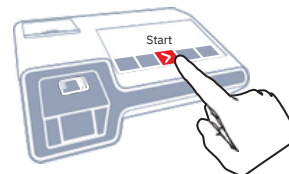

13 Lea los resultados

